

近赤外光カメラシステム用 滅菌カバー (商品名称: Lightvision Drape 100x120)



アーム用カバー 装着後全体像

清潔状態を保ちながら、近赤外光の不要な散乱を防ぎ、歪みや曇りのない画像を提供します。

ドレーピング



無菌的に開封したドレープを広げ、レンズカバー部分を把持し、もう一方の手で開口部から手を入れます。



開口部を広げてレンズカバーを引き出し、レンズカバーを内側から見える状態にします。



フィルムが被らないように注意しながら、レンズカバーをカメラのレンズ部分に装着し、ドレープをアームに装着していきます。

対応機種	商品番号	商品名称	注文単位	定価	備考
LIGHTVISION (島津製作所)	81-101-48	Lightvision Drape 100x120	48 枚	¥ 216,000	カメラアーム用
	81-101-16	Lightvision Drape 100x120	16 枚	¥ 72,000	カメラアーム用
	70-011-160	Remote Control & Cable Cover, 300/14	160 枚	¥ 192,000	リモコン用
	70-011-40	Remote Control & Cable Cover, 300/14	40 枚	¥ 48,000	リモコン用

注：伝票に記載される商品番号は「81-101」及び「70-011」となります。

製造元: Pharmasept, Ltd.(イスラエル)

輸入販売元: 〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-12
シカゴ東京メディカル株
Tel. (03) 3662-1230
Fax. (03) 3662-5040

代理店: