

# 近赤外光カメラシステム用 滅菌カバー




アーム用カバー 装着後全体像

清潔状態を保ちながら、近赤外光の不要な散乱を防ぎ、歪みや曇りのない画像を提供します。

## ドレーピング



無菌的に開封したドレープを広げ、レンズカバーを把持した状態で、緑色の矢印部分のひだを端から4枚めくります。

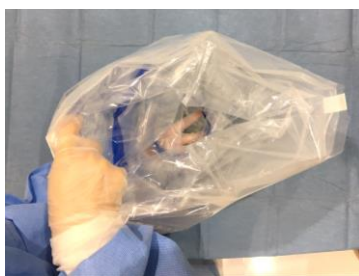

めくった部分からひだを広げ、レンズカバーを内側から見える状態にします。



フィルムが被らないように注意しながら、レンズカバーをカメラのレンズ部分に装着し、ドレープをアームに装着していきます。

対応機種	商品番号	商品名称	注文単位	定価	備考
LIGHTVISION (島津製作所)	81-100-30	Lightvision Drape 235x50	30 枚	¥ 162,000	カメラアーム用
	81-100-10	Lightvision Drape 235x50	10 枚	¥ 54,000	カメラアーム用
	70-011-160	Remote Control & Cable Cover, 300/14	160 枚	¥ 192,000	リモコン用
	70-011-40	Remote Control & Cable Cover, 300/14	40 枚	¥ 48,000	リモコン用

注：伝票に記載される商品番号は「81-100」及び「70-011」となります。

製造元: Pharmasept, Ltd.(イスラエル)

輸入販売元: シカゴ東京メディカル株式会社  
〒391-0216 長野県茅野市米沢4175-1  
【受注センター】  
電話番号03-6284-0800  
FAX番号03-6284-0802

代理店: